

## Die richtige Kondom-Passform

- Das Kondom sollte eng anliegen, damit es beim Geschlechtsverkehr nicht abrutscht. Das Abrollen über den steifen Penis sollte aber keine Schmerzen bereiten.
- Entstehen Falten und lässt sich das Kondom auf dem steifen Penis hin- und herschieben, ist das ein klares Indiz dafür, dass das Kondom zu groß ist.

Neben der schlanken Passform, bietet Ritex auch Kondome in Standardgrößen wie z. B. „RR.1“ sowie die extra großen „XXL“ Kondome an.



## Schmale Passform mit großer Wirkung

Kondome aus Naturkautschuklatex sind hochelastisch und passen „eigentlich immer“ – es sei denn, sie sind zu groß. Dann besteht eine erhöhte Gefahr des Abrutschens oder Reißens.

Ritex Kondome „47“ bieten mit ihrem Umfang von 94 statt 106 mm gerade bei schlankeren Penisgrößen einen angenehm festen Sitz und ein besonders sicheres Gefühl. Der Produktname „47“ leitet sich von der Breite des flachliegenden Kondoms (=halber Umfang) ab.





## Die passende Kondomgröße ermitteln

Du bist dir nicht sicher, welches Kondom das Richtige ist? Dann miss einfach nach. Dazu entweder diese Seite ausdrucken (wird in DIN A6 gedruckt), das Kondometer ausschneiden oder einfach ein Maßband nehmen, vorsichtig um den steifen Penis wickeln und den Umfang ablesen.

- Bis 11 cm ist die schlanke Passform optimal
- Ab 11 cm sind Standardgrößen die richtige Wahl
- Ab 13 cm Umfang sitzen Ritex XXL Kondome am besten

14  
13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
0





## RITEX QUALITÄTSVERSPRECHEN

DERMATOLOGISCH GETESTET  
SEHR GUT HAUTVERTRÄGLICH

### Ritex Kondom- und Gleitmittelsortiment



Mehr Infos unter [www.ritex.de](http://www.ritex.de)