



Gleitmittel Liebe, Lust & Leidenschaft!

Gleitmittel-Gebrauchshinweise

Ritex Gleitmittel sind Medizinprodukte zur Anwendung als Gleit- und Massagemittel im Intimbereich. Sie werden aus Rohstoffen bester Qualität in Deutschland hergestellt.

Ritex Gleitmittel werden auf den Scheideneingang und/oder den Penis aufgetragen und können beliebig oft angewandt werden. Bei Kondomverwendung dürfen die Gleitmittel nicht direkt auf den Penis oder die Innenseite des Kondoms aufgetragen werden, da sich hierdurch das Risiko erhöht, dass das Kondom abrutscht oder reißt.

Sollten Unverträglichkeiten bei der Anwendung von Ritex Gleitmitteln auftreten oder generell mangelnde Lubrikation vorliegen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Ritex Gleitmittel haben keine empfängnisverhütende Wirkung. Gleitmittel auf Wasserbasis können jedoch (aufgrund ihres vaginalen pH-Wertes) die Spermien­geschwindigkeit verringern. Sollten Sie gerade versuchen schwanger zu werden, wenden Sie sich bitte vor der Verwendung des Gleitmittels an Ihren Arzt.

Kühl, trocken und bei Raumtemperatur lagern. Tube nach jedem Gebrauch sorgfältig verschließen. Bei Ritex Gel⁺, Hydro Sensitiv Gel und Passion die geöffnete Tube innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.



Halbbarkeitsdatum (solange Tube ungeöffnet) und LOT Nr. siehe Boden der Fallschachtel und Tubenfuß.

GEL⁺ Ingredients: Aqua, Aloe Barbadensis, Glycerin, Propylene Glycol, Xanthan Gum, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid.

HYDRO Sensitiv Gel Ingredients: Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Sodium Lactate, Lactic Acid.

PASSION Ingredients: Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Xanthan Gum, Lactose, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Benzoate, Citric Acid, Potassium Sorbate, Microcrystalline Cellulose, Parfum, Tocopheryl Acetate, C.I. 77492.

LONGTIME Ingredients: Dimeticon.

GEL⁺

Das Gleitgel mit dem Plus an Pflege!

Das pflegende Ritex Gel⁺ mit Aloe Vera ist frei von Duft- und Farbstoffen.

Es spendet der Haut Feuchtigkeit und Pflege.



YDRO Sensitiv Gel

Das feuchtigkeitsspendende Gleitgel ist frei von Konservierungsstoffen und speziell auf den pH-Wert der Vaginal-Schleimhaut abgestimmt. Von Gynäkologen empfohlen.



Unsere Empfehlung:

Ritex Gleitmittel für mehr Liebe, Lust & Leidenschaft

Wichtig: Für eine sichere Kondomverwendung viel Gleitmittel ausschließlich auf die Außenseite des Kondoms auftragen.



Passion

Gleitgel Leidenschaft pur!

Der erotische Duft der Passionsfrucht verführt die Sinne – samtweiche Massage-Perlen streicheln zart die Haut. Ein unvergleichlich sinnliches Erlebnis.



Longtime

Medizinisches Silikonöl

Das Gleit- und Massageöl ist extra lange gleitfähig und frei von Zusatzstoffen. Optimal auch bei starker Beanspruchung.



NEU**Ritex**

Alle Kondome auf einen Blick, jetzt im neuen Look!



RR.1
Hauchzart
Gefühlsintensiv



Ideal
Extra feucht & sanft
Bessere Gleitfähigkeit



Perfect Fit
Spezialform
Besonders gefühlsstark



XXL
Extra groß
Mehr Komfort



Intensiv
Extra leichtes Abrollen
Intensives Gefühl



Lust
Genoppt & gerippt
Extra stimulierend



Sortiment
Mehr Abwechslung
Mehr Spaß



Geprüft nach EN ISO 4074:2002
Stand: Mai 2011
R MAT NR 5611370511

Kondom-Gebrauchshinweise

- 1 Siegelbriefchen **behutsam** an der **Zackenkante** aufreißen. Bitte beachten Sie, dass z.B. Fingernägel, Schmuck oder Piercings im Intimbereich das Kondom beschädigen können.
- 2 Bevor Penis und Körper des Partners sich berühren, das Kondom über den **steifen Penis abrollen**. **Vorhaut ganz zurückziehen**, Reservoir mit Daumen und Zeigefinger sanft zusammendrücken, mit **Abrollrand nach außen** auf die Eichel setzen und das Kondom **vollständig abrollen**.
- 3 Sobald der Penis zu erschlaffen beginnt, ziehen Sie ihn aus der Vagina heraus. **Beim Herausziehen halten Sie das Kondom auf dem Penis fest, damit es nicht abrutscht**. Jedes Kondom nur einmal benutzen.



Wichtige Hinweise

Diese Kondome sind aus Naturkautschuklatex und dürfen von **Latex-Allergikern** nicht benutzt werden. **Nicht vaginale Anwendung oder geringe Scheidenfeuchtigkeit gefährden die Sicherheit von Kondomen**. Um **mangelnde Gleitfähigkeit zu beheben**, sollten zusätzlich **kondomverträgliche Ritex Gleitmittel** wie z.B. **Gel⁺, Hydro Sensitiv Gel, Passion oder Longtime** in ausreichender **Menge auf der Außenseite des Kondoms benutzt werden**. Niemals zusätzliche Gleitmittel direkt auf dem Penis oder der Innenseite des Kondoms verwenden, da sich hierdurch das Risiko erhöht, dass das Kondom **abrutscht oder reißt**. Nie **öl- oder fetthaltige Gleitmittel** (z.B. Vaseline, Babyöl, Körperlotion) verwenden, sondern nur solche, die vom **Hersteller** für die Anwendung mit Latex-Kondomen empfohlen sind. Bei Anwendung von **Arzneimitteln** wie Zäpfchen, Salben, Cremes etc. an Vagina oder Penis fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, ob diese die Sicherheit des Kondoms beeinträchtigen können. Lagern bei Raumtemperatur nur in original **verschlossenen Siegelbriefchen**. Beachten Sie das **Halbbarkeitsdatum**. Entsorgen Sie benutzte Kondome nur über den Hausmüll. **Nicht ins WC werfen!**

Wenn eine **ungewollte Befruchtung oder Infektion** zu befürchten ist, oder wenn bei der Kondombenutzung **Unverträglichkeiten auftreten**, fragen Sie Ihren Arzt oder informieren Sie sich bei der **Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)***.

* **Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA):** Persönliche und anonyme online- und Telefonberatung zum Thema Safer Sex, Verhütung, etc. täglich ab 10 Uhr: 0 18 05/55 54 44 (14 Ct./min. aus d. dt. Festnetz) Telefonberatung@bzga.de oder www.aidsberatung.de

CE 0297

Ritex | D-33691 Bielefeld
ritex@ritex.de | www.ritex.de