

Die richtige Passform
für schlankere Größen



SCHLANKE
PASSFORM

47

Sicheres Gefühl bei
schlankeren Größen

8 KONDOME

Die richtige Passform

- Das Kondom sollte eng anliegen, damit es beim Geschlechtsverkehr nicht abrutscht. Das Abrollen über den steifen Penis sollte aber keine Schmerzen bereiten.
- Entstehen Falten und lässt sich das Kondom auf dem steifen Penis hin- und herschieben, ist das ein klares Indiz dafür, dass das Kondom zu groß ist.

Neben der schlanken Passform, bietet Ritex auch Kondome in Standardgrößen wie z. B. "RR.1" sowie die extra großen „XXL“ Kondome an.



Schmale Passform mit großer Wirkung

Kondome aus Naturkautschuklatex sind hochelastisch und passen "eigentlich immer" – es sei denn, sie sind zu groß. Dann besteht eine erhöhte Gefahr des Abrutschens oder Reißens.

Ritex Kondome "47" bieten mit ihrem Umfang von 94 statt 106 mm gerade bei schlankeren Penisgrößen einen angenehm festen Sitz und ein besonders sicheres Gefühl. Der Produktname "47" leitet sich von der Breite des flachliegenden Kondoms (=halber Umfang) ab.





Die passende Kondomgröße ermitteln

Sie sind sich nicht sicher, welches Kondom das Richtige ist? Dann messen Sie nach. Dazu entweder diese Seite ausdrucken (bitte auf Skalierung achten), das Kondometer ausschneiden oder einfach ein Maßband nehmen, vorsichtig um den steifen Penis wickeln und den Umfang ablesen.

- Bis 11 cm ist die schlanke Passform optimal
- Ab 11 bis 13 cm sind Standardgrößen die richtige Wahl
- Ab 13 cm Umfang sitzen Ritex XXL Kondome am besten





Ritex Premium Kondome und Gleitmittel

Ritex Premium Kondome und Gleitmittel werden mit modernster Technologie in Deutschland hergestellt und unterliegen regelmäßigen, strengen Qualitätskontrollen.



Zusätzlich werden Ritex Kondome der strengen Fremdüberwachung durch die staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt unterzogen.

RITEX QUALITÄTSVERSprechen
Dermatologisch getestet · sehr gut hautverträglich



Made in Germany

Ritex Kondom- und Gleitmittelsortiment ab Oktober 2017



Mehr Infos unter www.ritex.de