



Made in Germany

## Für mehr Liebe, Lust & Leidenschaft



**LONGTIME  
EXTRA LANGE  
GLEITFÄHIG**  
Medizinisches Silikonöl,  
frei von Zusatzstoffen.  
Regelmäßige Anwendung  
hält die Haut zart und  
geschmeidig.



**HYDRO  
SENSITIV GEL**  
Das feuchtigkeitsspendende  
Gleitgel ist frei von  
Konservierungsstoffen und  
speziell auf den pH-Wert  
der Vaginal-Schleimhaut  
abgestimmt.  
**GYNÄKOLOGISCH  
GETESTET\***.



**BIO Gleitgel  
VEGAN**  
Ritex BIO Gleitgel wird aus  
vegane Rohstoffen bester  
Qualität hergestellt. Es ist frei  
von Duft- und Farbstoffen,  
PEG, Parabenen und anderen  
Konservierungsstoffen.  
Schützt die empfindlichen  
Schleimhäute auf natürliche  
Weise.



**GEL+  
MIT BIO ALOE VERA**  
Ritex GEL+ mit BIO Aloe Vera  
ergänzt die natürliche  
Feuchtigkeit im Intimbereich  
und erhöht die Gleitfähigkeit.  
So wird die zarte Haut ge-  
schützt und mit BIO Aloe Vera  
intensiv gepflegt. GEL+ ist  
pH-hautneutral und frei von  
Farb- und Duftstoffen.

---

**RITEX QUALITÄTSVERSPRECHEN**  
Dermatologisch getestet · sehr gut hautverträglich

---



Made in Germany

## Für mehr Liebe, Lust & Leidenschaft

### **Erotik unbeschwert genießen**

Ritex Gleitmittel sind Medizinprodukte zur Anwendung als Gleit- und Massage-mittel im Intimbereich. Sie ergänzen die körpereigene Lubrikation, unterstützen die natürliche Gleitfähigkeit und erhöhen so das Lustempfinden.

### **Beste Qualität – Sehr gute Verträglichkeit**

Ritex Gleitmittel enthalten ausgewählte Rohstoffe bester Qualität. Ihre Hautverträglichkeit wurde von einem unabhängigen, anerkannten Institut in klinischen Tests\* mit „Sehr Gut“ bewertet.

### **Gleitmittel und Kondome**

Ritex Gleitmittel können mit allen Ritex Kondomen verwendet werden. Einfach außen auf das bereits angelegte Kondom auftragen.

### **Hergestellt in Deutschland**

Ritex Gleitmittel werden mit modernster Technologie in Deutschland hergestellt und unterliegen regelmäßigen, strengen Qualitätskontrollen.

## Gleitmittel-Gebrauchshinweise:

Ritex Gleitmittel werden im vaginal-, Anal- oder Penisbereich aufgetragen und können beliebig oft angewandt werden.

Bei Kondomverwendung das Gleitmittel auf die Außenseite des bereits über den Penis abgerollten Kondoms auftragen. Niemals zusätzliche Gleitmittel auf der Kondom-Innenseite (zwischen Kondom und Penis) verwenden, da hierdurch das Kondom leichter abrutschen oder reißen kann.

Sollten Unverträglichkeiten bei der Anwendung von Ritex Gleitmitteln auftreten oder generell mangelnde Lubrikation vorliegen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Gleitmittel können die Chance einer Befruchtung reduzieren. Wenn Sie schwanger werden wollen, empfehlen wir deshalb Ritex Kinderwunsch Gleitmittel.

Halbbarkeitsdatum (solange Tube ungeöffnet) und LOT Nr. siehe Boden der Faltschachtel und Tubenfalz.

### **Ingredients (INCI):**

**BIO:** Glycerin, Aqua, Xanthan Gum, Lactic Acid.

**GEL+:** Aqua, Aloe Barbadensis, Glycerin, Propylene Glycol, Xanthan Gum, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid.

**HYDRO:** Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Sodium Lactate, Lactic Acid.

**LONGTIME:** Dimethicone.

**Bitte beachten Sie auch die nachstehenden Hinweis-Symbole auf der Verpackung:**



Bitte beachten Sie die ausführlichen Hinweise auf diesem Beipackzettel.



Produkt zwischen 0 °C und 25 °C lagern.



Geöffnete Tube innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.



Verfalldatum. Produkt nicht benutzen, wenn Verfalldatum überschritten.



Nummer der Produktcharge



Ritex Artikelnummer



Hersteller



Ritex GmbH  
Gustav-Winkler-Straße 50  
33699 Bielefeld · Germany

ritex@ritex.de

\*Mehr Infos unter: [www.ritex.de](http://www.ritex.de)

