



Made in Germany

Hergestellt aus Naturkautschuklatex, einem natürlichen Rohstoff des Gummibaums, ermöglichen Ritex Kondome ein intensives und besonders natürliches Gefühl. Sie sind hochelastisch und passen sich optimal allen Penisgrößen an – **wie eine zweite Haut.**



47
SCHLANKE
PASSFORM

SORTIMENT
MEGA MIX

XXL
EXTRA GROß

IDEAL
EXTRA FEUCHT

RR.1
GEFÜHLS-
INTENSIV

EXTRA DÜNN
NATÜRLICHES
EMPFINDEN

LUST
GENÖPPT
UND GERIPPT

FEELING
PERFEKTE
PASSFORM


RITEX QUALITÄTSVERSPRECHEN
Dermatologisch getestet · sehr gut hautverträglich

Kondom-Gebrauchshinweise:

Stand: 05-2020



Siegelbriefchen **behutsam** an der **Zackenkante** aufreißen. Bitte beachten Sie, dass z. B. Fingernägel, Schmuck oder Piercings im Intimbereich das Kondom beschädigen können.

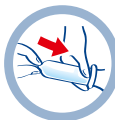

Bevor Penis und Körper des Partners sich berühren, das Kondom über den steifen Penis abrollen. **Vorhaut ganz zurückziehen**, Reservoir mit Daumen und Zeigefinger sanft zusammendrücken, **mit Abrollrand nach außen** auf die Eichel setzen und das Kondom vollständig abrollen.



Sobald der Penis zu erschlaffen beginnt, das Kondom rutscht oder sehr spannt (Gefahr des Berstens), ziehen Sie den Penis heraus. **Halten Sie dabei das Kondom am Penisansatz fest, damit es nicht abrutscht.** Sollte das Kondom nach Verwendung ein Loch aufweisen oder gerissen sein, sobald wie möglich, jedoch innerhalb von 72 Stunden, einen Arzt aufsuchen.

Ritex Kondome sind für die Anwendung beim vaginalen Geschlechtsverkehr bestimmte Medizinprodukte zur Empfängnisverhütung und zum lokalen Infektionsschutz. Bei nicht vaginaler Anwendung ist das Risiko des Abrutschens oder der Beschädigung höher. Keine Verhütungsmethode kann einen 100%igen Schutz vor Schwangerschaft und Infektionen garantieren.

Um **mangelnde Gleitfähigkeit** zu beheben, ausschließlich nur solche Gleitmittel verwenden, die vom Hersteller für die Anwendung mit Latex-Kondomen empfohlen sind (z. B. Ritex Gleitmittel: BIO, GEL+, HYDRO SENSITIV oder LONGTIME). In ausreichender Menge auf die **Außenseite** des bereits über den Penis abgerollten Kondoms auftragen. Niemals zusätzliche Gleitmittel auf der Kondom-Innenseite (zwischen Kondom und Penis) verwenden, da hierdurch das Kondom leichter abrutschen oder reißen kann. Niemals öl- oder fetthaltige Gleitmittel (z. B. Vaseline, Babyöl, Körperlotion) verwenden.

Bei Anwendung von Arzneimitteln wie Zäpfchen, Salben, Cremes etc. im Intimbereich fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, ob diese die Sicherheit des Kondoms beeinträchtigen können.

Kondome bei Raumtemperatur nur in original verschlossenen Siegelbriefchen aufbewahren.

Entsorgen Sie benutzte Kondome nur über den Hausmüll. Nicht ins WC werfen!

Wenn eine ungewollte Befruchtung oder Infektion zu befürchten ist, oder wenn bei der Kondombenutzung Unverträglichkeiten auftreten, fragen Sie Ihren Arzt oder informieren Sie sich bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA):

BZgA Beratung zu HIV und Aids: täglich ab 10 Uhr: 01805/555444 (0,14 ct/Min. aus d. dt. Festnetz, Mobilfunktarif max. 0,42 €/Min.), poststelle@bzga.de oder www.aidsberatung.de.

Ritex – für ein gutes Gefühl

Medizinprodukte-Hersteller werden jährlich von ihrer **Benannten Stelle** überprüft. In diesen Überprüfungen muss der Hersteller darlegen, dass sein Qualitätsmanagementsystem geeignet ist, die Anforderungen an das zu zertifizierende Medizinprodukt zu erfüllen.

Über die gesetzlichen Anforderungen hinaus lässt Ritex die Qualität seiner Kondome durch die staatliche Materialprüfungsanstalt (MPA) Darmstadt gemäß Inspektionsprogramm IP-494 **fremdüberwachen**. Mit diesem Inspektionsprogramm hat die MPA Darmstadt ein Programm zur Gütesicherung von Kondomen und Inspektion von Kondomherstellern geschaffen, welches noch über die Anforderungen der aktuellen EN ISO 4074 hinausgeht.








Hierdurch wird sichergestellt, dass nicht nur das Qualitätsmanagementsystem des Herstellers in Ordnung ist, sondern dass die Qualität der Produkte selbst nachgeprüft wird. Die MPA zieht beim Hersteller Stichproben und überprüft diese im Labor der Materialprüfungsanstalt. Nur wenn alles in Ordnung ist, dürfen die jeweiligen Produkte mit dem MPA-TESTED-Zeichen ausgezeichnet werden.



Neben der Überprüfung der werkeigenen Produktionskontrolle ist die herausragende Besonderheit, dass die Qualität der Produkte selbst von einer staatlichen Materialprüfungsanstalt nachgeprüft wird.

Mehr Informationen finden Sie unter www.ritex.de.

Bitte beachten Sie auch die nachstehenden Hinweis-Symbole auf der Verpackung:

-  Bitte beachten Sie die ausführlichen Hinweise auf diesem Beipackzettel.
-  Jedes Kondom nur einmal benutzen, da bei Wiederverwendung ein erhöhtes Risiko einer Beschädigung bzw. Infektion zu befürchten ist.
-  Nicht benutzen, wenn das Siegelbriefchen beschädigt ist. Kondom entsorgen und ein neues verwenden.
-  Kondome vor direktem Sonnenlicht und Hitze geschützt lagern.
-  Kondome trocken lagern.
-  Verfalldatum. Kondome nicht benutzen, wenn Verfalldatum überschritten.
-  Diese Kondome sind aus Naturkautschuklatex, der bei Latex-Allergikern allergische Reaktionen einschließlich eines anaphylaktischen Schocks hervorrufen kann. Latex-Allergiker dürfen diese Kondome deshalb nicht benutzen.
-  Nummer der Kondomcharge
-  Hersteller
-  Ritex GmbH
Gustav-Winkler-Straße 50
33699 Bielefeld · Germany
ritex@ritex.de
www.ritex.de

