



Made in Germany

PRO NATURE

Für Mensch und Natur

Höchste Qualität und Verantwortungsbewusstsein stehen bei Ritex als Medizinprodukt hersteller an oberster Stelle. Wir sehen es als unsere Pflicht an, einen schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen zu pflegen, nachhaltig zu handeln und damit unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.

Die Produktlinie **Ritex PRO NATURE** verbindet die hohen Qualitätsansprüche an das Medizinprodukt Kondom mit einer ökologisch nachhaltigen Produktion in Deutschland:



CLASSIC
Natürlich...
viel Gefühl



INTENSIV
Natürlich...
genoppt



SENSITIV
Natürlich...
extra feucht



Unsere Kondome tragen das FSC®-Zeichen, welches hier für einen ökologisch und sozial nachhaltigen Anbau von Naturkautschuklatex steht.



Unser Strom stammt ausschließlich aus Energiequellen, welche die hohen und international anerkannten Standards von EKOenergy erfüllen.



Unsere Produktion in Bielefeld arbeitet mit effektiven Wärme-Rückgewinnungs-Systemen.



Unser Umwelt-Team analysiert und optimiert regelmäßig unsere Arbeitsprozesse.



Unsere Schachtel wird aus einem innovativen Mix von Grasfaser und Recycling-Papier hergestellt.

Ritex engagiert sich:

Ritex schützt die Wildbienen

... und natürlich auch die anderen heimischen Insekten! Auf unserem Firmengelände haben wir auf über 1.000 m² eine Wiese mit Streuobst und regionalen Wildblumen angelegt, die als natürlicher Lebensraum für eine Vielzahl von Insekten aber auch für Vögel dient. Ein kleiner Naturtümpel sorgt für eine stete Wasserversorgung und bietet zudem einen Rückzugsort für ortsansässige Amphibien.

Ritex nimmt am ÖKOPROFIT® Klub teil

ÖKOPROFIT® ist ein Kooperationsprojekt zwischen Kommune und der örtlichen Wirtschaft mit dem Ziel der Betriebskostensenkung unter gleichzeitiger Schonung der natürlichen Ressourcen (u. a. Wasser, Energie). Durch die Zusammenarbeit mit ÖKOPROFIT®-Bielefeld wurden bereits Maßnahmen entwickelt, welche den jährlichen CO₂ Ausstoß von Ritex deutlich reduziert haben.

Ritex nutzt EKOenergy-Strom

Das Besondere an den Richtlinien von EKOenergy besteht darin, dass der Strom nicht nur aus nachhaltigen Quellen mit CO₂-neutraler Energiegewinnung stammt, sondern dass die Energieerzeuger auch weitergehende Nachhaltigkeitskriterien einhalten müssen (z. B. keine Windkraftfelder in Vogelschutzgebieten). Darüber hinaus werden pro Megawattstunde mindestens 0,10 EUR in den zweitweiligen Ausbau von umweltschonender Energiegewinnung investiert.



0297

Geprüft nach EN ISO 4074

Kondom-Gebrauchshinweise:

Stand: 11-2019



Siegelbriefchen **behutsam** an der **Zackenkante** aufreißen. Bitte beachten Sie, dass z. B. Fingernägel, Schmuck oder Piercings im Intimbereich das Kondom beschädigen können.



Bevor Penis und Körper des Partners sich berühren, das Kondom über den steifen Penis abrollen. **Vorhaut ganz zurückziehen**, Reservoir mit Daumen und Zeigefinger sanft zusammendrücken, **mit Abrollrand nach außen** auf die Eichel setzen und das Kondom vollständig abrollen.



Sobald der Penis zu erschlaffen beginnt, das Kondom rutscht oder sehr spannt (Gefahr des Berstens), ziehen Sie den Penis heraus. **Halten Sie dabei das Kondom am Penisansatz fest, damit es nicht abrutscht**. Sollte das Kondom nach Verwendung ein Loch aufweisen oder gerissen sein, sobald wie möglich, jedoch innerhalb von 72 Stunden, einen Arzt aufsuchen.

Ritex Kondome sind für die Anwendung beim vaginalen Geschlechtsverkehr bestimmte Medizinprodukte zur Empfängnisverhütung und zum lokalen Infektionsschutz. Bei nicht vaginaler Anwendung ist das Risiko des Abrutschens oder der Beschädigung höher. Keine Verhütungsmethode kann einen 100%igen Schutz vor Schwangerschaft und Infektionen garantieren.

Um **mangelnde Gleitfähigkeit** zu beheben, ausschließlich nur solche Gleitmittel verwenden, die vom Hersteller für die Anwendung mit Latex-Kondomen empfohlen sind (z. B. Ritex Gleitmittel: BIO, GEL+, HYDRO SENSITIV oder LONGTIME). In ausreichender Menge auf die **Außenseite** des bereits über den Penis abgerollten Kondoms auftragen. Niemals zusätzliche Gleitmittel auf der Kondom-Innenseite (zwischen Kondom und Penis) verwenden, da hierdurch das Kondom leichter abrutschen oder reißen kann. Niemals öl- oder fetthaltige Gleitmittel (z. B. Vaseline, Babyöl, Körperlotion) verwenden. Bei Anwendung von Arzneimitteln wie Zäpfchen, Salben, Cremes etc. im Intimbereich fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, ob diese die Sicherheit des Kondoms beeinträchtigen können. Kondome bei Raumtemperatur nur in original verschlossenen Siegelbriefchen aufbewahren. Entsorgen Sie benutzte Kondome nur über den Hausmüll. Nicht ins WC werfen!

Wenn eine ungewollte Befruchtung oder Infektion zu befürchten ist, oder wenn bei der Kondombenutzung Unverträglichkeiten auftreten, fragen Sie Ihren Arzt oder informieren Sie sich bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA):

BZgA Beratung zu HIV und Aids: täglich ab 10 Uhr: 01805/555444 (0,14 ct/Min. aus d. dt. Festnetz, Mobilfunktarif max. 0,42 €/Min.), poststelle@bzga.de oder www.aidsberatung.de.

Bitte beachten Sie auch die nachstehenden Hinweis-Symbole auf der Verpackung:



Bitte beachten Sie die ausführlichen Hinweise auf diesem Beipackzettel.



Jedes Kondom nur einmal benutzen, da bei Wiederverwendung ein erhöhtes Risiko einer Beschädigung bzw. Infektion zu befürchten ist.



Nicht benutzen, wenn das Siegelbriefchen beschädigt ist. Kondome entsorgen und ein neues verwenden.



Kondome vor direktem Sonnenlicht und Hitze geschützt lagern.



Kondome trocken lagern.



Verfalldatum. Kondome nicht benutzen, wenn Verfalldatum überschritten.



Diese Kondome sind aus Naturkautschuklatex, der bei Latex-Allergikern allergische Reaktionen einschließlich eines anaphylaktischen Schocks hervorrufen kann. Latex-Allergiker dürfen diese Kondome deshalb nicht benutzen.



Nummer der Kondomcharge



Ritex Artikelnummer



Hersteller



Ritex GmbH
Gustav-Winkler-Straße 50
33699 Bielefeld · Germany
ritex@ritex.de
www.ritex.de

